



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
SUBSEÇÃO DE GESTÃO ODONTOLÓGICA



FORMULÁRIO PARA PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04/2018 - PMDF

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PARECER TÉCNICO

Primeira análise das amostras enviadas no pregão 04/2018. Empresa: **SDK COMÉRCIO DE CORRELATOS DA SAÚDE LTDA - EPP**; **Item 01**: BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO; Marca comercial da amostra apresentada: PROPHYLAXIS - FORMADEN; Parecer: **Amostra APROVADA**; **Item 02**: PONTA EM AÇO INOX MODELO PERIO SUB; Marca comercial da amostra apresentada: HOL DENT; Parecer: **Amostra REPROVADA, conforme relatório em anexo**; **Item 03**: PONTA EM AÇO INOX MODELO PERIO SUPRA; Marca comercial da amostra apresentada: HOL DENT; Parecer: **Amostra REPROVADA**. Por decisão junto à equipe de periodontia, ambas as pontas foram reprovadas por serem do mesmo fabricante e terem demonstrado através da análise da ponta perio sub a não-durabilidade do material.

É o parecer.

Parecerista: **MAJ QOPMSD LAURA DEGANI** Matrícula Nº 177965-6

Telefone: 061.3190-7357

Lotação: Diretoria de Assistência Odontológica - PMDF

Data: 06/06/2018


Assinatura Parecerista

Relatório: Avaliação de duas pontas de ultrassom de periodontia para raspagem subgingival e supragingival.

As pontas foram esterilizadas e foram utilizadas três vezes cada uma, higienizadas e esterilizadas após cada uso, a aparência das duas pontas é muito similar com a original da Dani Atlante, e o encaixe no conector da caneta de ultrassom assim como o travamento com a chave original foram clinicamente aceitáveis conectando perfeitamente e possibilitando o atendimento sem nenhuma intercorrência. A ação vibratória da ponta e o fluxo de água constante também foram compatíveis com o original. Porém no último uso da ponta para raspagem subgingival, a de menor diâmetro, percebi uma torção da ponta ativa.

As pontas foram utilizadas somente três vezes e já houve defeito na ponta ativa da subgingival, de menor diâmetro, diante disso por se tratar de pontas confeccionadas com o mesmo material e com o mesmo fabricante não há confiabilidade na durabilidade da ponta supragingival que inviabiliza o uso das duas pontas (supragingival e subgingival) pela possibilidade de torção e fratura durante o atendimento odontológico colocando em risco a saúde do paciente.

Brasília 06 de Junho de 2018.



2ª Tem Priscila Paim QOPMSD

Matrícula 734.052-4

Periodontista e Implantodontista CRO-DF 7281